



División Médicos

Cinta Medico-Quirurgica Micropore Blanco 1530



Fecha Digitación

05/11/99

Fecha Actualización

11/02/2003

Descripción

Cinta con un respaldo de rayón blanco no tejido con soporte acrílico, cubierto en un lado con un adhesivo acrílico hipoalergénico sensible a la presión.

Construcción (Composición)

Respaldo: Tela de rayón blanca no tejida con soporte acrílico.

Adhesivo: Hipoalergénico, acrílico, sensible a la presión.

Especificaciones (Características Técnicas)

PROPIEDAD	SISTEMA INGLES	SISTEMA METRICO
Adhesión al Acero	9 Oz / pulg mínimo	255 g / 25 mm mínimo 2.5 N / 25 mm mínimo
Porosidad (aire)	150 s/100 cc/pulg ² min	150 s/100 cc/pulg ² min
Espesor	5.5 mils nominal	0.14 mm nominal
Tensión (MD)	5 lb / pulg mínimo	22.2 N / 25 mm mínimo
Tensión (CD)	2 lb / pulg mínimo	8.9 N / 25 mm mínimo

Usos (Aplicaciones)

- Curaciones Generales, Cirugia Plastica, Curaciones menores
- Para fijar Cateteres, sondas, drenes, tubos en T
- Para usos repetitivos en pieles delicadas.
- En cirugía Oftálmica y de Otorrino.
- Para proteger la piel Periostomal.
- Para disimular problemas de manera transitoria como cicatrices, espinillas, ect .
- Para hacer "BIGOTES" en Neonatos.

Instrucciones de Uso

Técnicas de aplicación

- Aplique la cinta siempre sobre piel limpia y seca.
- Para una buena adhesión, aplique presión del centro a la periferia .
- No aplique la cinta con demasiada tensión, puede ocasionar daños a la piel.
- Usarse preferiblemente en áreas no articuladas .

- Al fijar apositos dejar 3cm de cinta en contacto con la piel.
- Cuando se fijan apositos grandes o areas de alto movimiento o friccion, utilice la tecnica de escalera: colocar una cinta perpendicular a las cintas de soporte al aposito .
- Corte con tijera para un borde mas preciso .
-

Tecnica de remocion

- Retirar lentamente cada uno de los extremos de la cinta hacia los bordes de la venda .

Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

Vida Util del Producto

La vida util del Micropore es de 5 años. Siempre y cuando sea almacenado en las condiciones recomendadas.

Notas Especiales

El producto debe ser almacenado a temperaturas entre 10-27°C (50-80° F) y una humedad relativa entre 40 y 60 %.

Condiciones de Transporte

N/A

Concepto Técnico (Div. Medica):

Presentaciones comerciales :

STOCKNUMBER	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
LH-0000-0316-0	770-2098-40010-8	Micropore 12mmx5m Dispensador	96 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0317-8	770-2098-40011-5	Micropore 24mmx5m Dispensador	60 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0318-6	770-2098-40012-2	Micropore 48mmx5m Dispensador	36 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0361-1	770-2098-40058-0	Micropore 72mmx5m Dispensador	24 Rollos/caja corrugada

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677	3M BARRANQUILLA Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432
3M MEDELLIN Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282 Fax: 094 - 3116292	3M CALI Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414 Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.mmm.com>

Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636** o **018000113M3M**