

		FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO			Versión: 0		
					Fecha: Mayo 2011		
					Código: FT-GT-016		
NOMBRE DEL PRODUCTO:	FRESA DIAMANTADA MARCA DIATECH	REF:	VARIAS	NOMBRE GENERICO:	FRESA DIAMANTADA		
				DATOS GENERALES:			
				PRESENTACION:		CAJA X 5	
				FABRICANTE:		COLTENE/ WHALEDENT AG SUIZA	
				IMPORTADO POR:		ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA	
				REGISTRO SANITARIO:		INVIMA 2007DM-0000682	
				FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:		14 DE JUNIO DE 2017	
				CLASIFICACION DE RIESGO:		I	
				TIPO DISPOSITIVO:		INVASIVO QUIRURGICO REUTILIZABLE	
				VIDA UTIL:		NO APLICA	
				ALMACENAMIENTO		Almacenar un lugar fresco	
DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:							
ESTERILIZACIÓN:		<ul style="list-style-type: none"> • SUMERGIR EN JABON ENZIMATICO DURANTE 60 MINUTOS (ESTOS JABONES DEBEN TENER AGENTES INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN) • DESINFECTANTES ACIDOS Y ALKALINOS FUERTES, PUEDEN AFECTAR LA FRESA. LAS FRESAS NO SE DEBE DEJAR POR MAS DE 60 MINUTOS O PERIODOS PROLONGADOS SUMERGIDOS EN LOS LIQUIDOS DESINFECTANTES. • SI PERSISTEN RESIDUOS, ESTOS DEBEN SER LAVADOS DE MANERA MECÁNICA A MANO CON UN CEPILLO DE CERDAS DE NYLON. • SE PUEDE ESTERILIZAR EN MEDIOS QUIMICOS (EN FRIO), CALOR SECO O AUTOCLAVE DE VAPOR HUMEDO. • SE DEBEN SECAR DESPUES DE ESTERILIZARLAS • MANTENER LAS FRESAS ESTERILIZADAS EN UN FRESERO CON TAPA • ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE: ANTES DE PROCEDER A LA ESTERILIZACIÓN ES PRECISO SUMERGIR LA FRESA EN UN SOLUCIÓN PROTECTORA CONTRA LA CORROSIÓN COMO, P. E.J., NITRITO DE SODIO AL 1%. LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE SE DEBE REALIZAR A 132° C DURANTE 12 MINUTOS COMO MÍNIMO. • AIRE CALIENTE: 6 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 190° C. • LIMPIEZA CON ULTRASONIDO: ES RECOMENDABLE UTILIZAR DISPOSITIVOS DE SOPORTE O DE SUJECCIÓN PARA LAS FRESAS. DE ESTE MODO SE EVITAN DAÑOS EN LOS FILOS DE LOS INSTRUMENTOS PROVOCADOS POR EL CONTACTO ENTRE ELLOS DURANTE LA VIBRACIÓN. LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO RECOMIENDAN UN CICLO DE 5 MINUTOS. 					
COMPOSICION:		ACERO INOXIDABLE Y MICROESFERAS DE DIAMANTADA					
USOS:		INSTRUMENTAL ROTATORIO PARA EL PULIDO DE RESINAS, DE USO EN OPERATORIA Y RESTAURACION					
CONTRAINDICACIONES:		NINGUNA REPORTADA					
APROBADO POR:		NOMBRE:	PATRICIA RESTREPO OCHOA				
		CARGO:	DIRECTORA TECNICA				