


División Médicos
Aposito Transparente
Tegaderm

•
29/01/2007

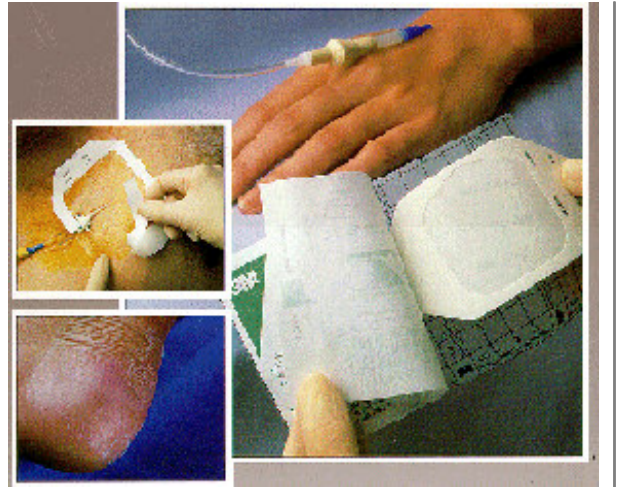

Hoja Técnica

Descripción

El aposito **ESTERIL** Tegaderm consiste en una fina película transparente con un adhesivo hipoalergénico sin contenido de látex. El aposito es poroso y permite un buen intercambio de oxígeno y del vapor húmedo. Es impermeable al agua y a líquidos y no permite el paso de bacterias.

Composición

Película transparente con adhesivo hipoalergénico. **estéril**

Especificaciones (Características Técnicas)

N/A

Usos y Aplicaciones

Los apositos transparentes Tegaderm se pueden usar para cubrir y proteger heridas y puntos de punción de catéteres, para mantener un ambiente húmedo que favorezca la curación de heridas, como aposito secundario, como cubierta protectora sobre una piel sensible, para asegurar dispositivos en la piel y como una cobertura ocular de protección. También se puede usar para proporcionar un ambiente húmedo a las heridas y facilitar el desbridamiento autolítico. Las aplicaciones comunes incluyen:

- Incisiones quirúrgicas cerradas y limpias.
- Areas de injertos de piel en el donador.
- Prevención y tratamiento de úlceras por presión superficiales.
- Aposito secundario sobre gasa, alginatos o hidrogeles.
- Heridas superficiales tales como abrasiones, desgarros y ampollas en la piel.
- Quemaduras de primer y segundo grado.
- Piel excoriada o piel continuamente expuesta a la humedad.
- Cubierta ocular protectora durante la cirugía o para pacientes con abrasiones en la cornea.
- Catéteres IV.

- Otros catéteres intravasculares y dispositivos percutáneos.

CONTRAINDICACIONES

1. El apósito transparente Tegaderm no está indicado para aplicarse sobre zonas de implantación de catéteres que estén infectadas ni sobre heridas infectadas.
2. El apósito transparente Tegaderm no está indicado para reemplazar suturas ni otros métodos primarios de cierre de heridas.

Instrucciones de Uso

SELECCION DEL APOSITO

Seleccione un apósito de tamaño suficiente para permitir que haya un margen mínimo de dos o tres centímetros, que se adhiera a la piel sana en la periferia de la herida o del punto de punción del catéter.

PREPARACION DEL AREA

1. Prepare el área de acuerdo con su protocolo de trabajo.
2. El cortar el vello en el lugar de aplicación puede mejorar su adherencia. No se recomienda rasurar la zona.
3. Permita que todas las soluciones de preparación y protección se sequen completamente antes de aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y asegurar una buena adherencia.

APLICACION

1. Abra el empaque y saque el apósito esteril.
2. Quite y deseche la porción central recortada.
3. Despegue el papel impreso del apósito exponiendo la superficie del adhesivo.
4. Centre el apósito sobre la herida o sobre el punto de punción del catéter.
5. Quite el marco lentamente mientras alisa los bordes del apósito.
6. Alise el apósito desde el centro hacia los bordes aplicando una presión firme para mejorar su adhesión.

SEGUIMIENTO

1. Debe observarse diariamente el área para ver si hay signos de infección u otras complicaciones. Si se sospecha que hay infección, quite el apósito, examine directamente el área y determine la intervención médica adecuada. Una infección puede advertirse por la aparición de fiebre, dolor, enrojecimiento, hinchazón, olor o pus.
2. Cambie el apósito de acuerdo a su protocolo de trabajo, o cuando sus propiedades protectoras se vean afectadas. Por ejemplo, el apósito debe cambiarse si está suelto o se perfora con las suturas u otros dispositivos médicos.

RETIRADA DEL APOSITO

Sujete el apósito suavemente por uno de sus bordes y despeguelo lentamente de la piel en dirección del crecimiento de los vellos. Evite causar un trauma a la piel despegando el apósito hacia atrás estirándolo, en lugar de tirar de él. Alternativamente, para retirarlo de zonas de punción o con otros dispositivos, sujete un borde del apósito y con suavidad tire de él directamente hacia afuera para estirarlo y despegarlo. También se puede usar un solvente de adhesivos para facilitar la remoción del apósito.

Se debe tener cuidado de no desconectar catéteres ni otros dispositivos, y de no dañar la superficie de la herida en donde ha habido epitelización, se debe humedecer suavemente.

Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

Vida Útil del Producto

La vida útil del producto es de 3 años.

Notas Especiales

Para obtener mejores resultados, almacene el apósito en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad aparece en el empaque. Se garantiza la esterilidad de cada empaque, a menos que este dañado o abierto.

ESTERIL, METODO DE ESTERILIZACION RAYOS GAMMA

PRODUCTO DE UN SOLO USO.

Condiciones de Transporte

N/A

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Si desea Enviar información a Nuestro E-Mail: servicioalcliente@mmm.com

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**