

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁNULA GUEDEL ET-DP03-13	Rev. # 1
		Fecha de Vigencia: 2014-05-01

Fecha de Actualización: May 2014

NOMBRE		CÁNULA GUEDEL			
MARCA	MEDEX	CLASIFICACION DEL RIESGO	IIA	VIDA UTIL	5 Años
REG SANITARIO	INVIMA 2012 DM-001667 R1	VIGENCIA	10-may-2022	MODALIDAD	Importar, semielaborar y vender
FABRICANTE	MEDITEC SA	INVASIVO	SI	USO	CORTO PLAZO
RECOMENDACIONES DE USO	Tubo Bucofaríngeo que mantiene la vía aérea permeable y se utiliza para la administración de oxígeno introduciéndolo por la boca. TÉCNICA: * Abrir la boca del paciente * Mantener en hiperextensión la cabeza * Deslizar por el paladar hasta introducir la mitad de la cánula * Se gira 180° y se sigue introduciendo hasta la pared orofaríngea				
INDICACIONES	Se utiliza para la administración de oxígeno o gases anestésicos a los pacientes.				
COMPOSICION	Plástico (PVC: Cloruro de Polivinilo) Grado médico, Atóxico, Libre de Látex, biocompatible, antiadherente.				
FORMA	Cánula transparente de superficie lisa y anillo mordedor de color verde para evitar la oclusión accidental.				
REFERENCIAS/ CALIBRE(Fr)	0-1-2-3-4-5	MARCACIONES	No Aplica		
		LÍNEA RADIOPACA	No Aplica		
PRESENTACION COMERCIAL	Empacados en unidades Estériles.	MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Gas Oxido de Etileno		
PRECAUCIONES	No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.				
RESTRICCIONES	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso				
VENTAJAS	Proceso de Esterilización a concentraciones bajas de oxido de Etileno(10%), lo cual garantiza la completa atoxicidad del dispositivo.				
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	Atóxico	ANALISIS	FISICOS	Textura, Ensamble, Fugas.	
	Esteril		QUÍMICOS	Toxicidad.	
	Apirógeno		MICROBIOLOGICOS	Prueba de Esterilidad, Pirógenos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol	* Lluvia * Fuentes de calor	* Vapores		
METODOLOGÍA	Basado en la USP 37				

Jherlym Cruz Salazar
JHERLYM CRUZ SALAZAR
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 T.P. 8474



Amparo Reinoso Benítez
AMPARO REINOSO BENÍTEZ
 REPRESENTANTE LEGAL