

# Aguja Múltiple de Bioseguridad Vacutainer® BD Eclipse®

## BD Eclipse®

### Descripción de producto:

Aguja en acero inoxidable estéril para la extracción de sangre al vacío con dispositivo de Bio-Seguridad integrado a la aguja

### Características Generales

- Aguja de doble punta, una de ellas se inserta en el paciente y la otra perfora los tubos al vacío
- Por su paredes delgadas el lumen de la aguja es más amplio para permitir el flujo de sangre y así disminuir el riesgo de hemólisis.
- Tiene un sello de seguridad de color blanco que une las dos partes de la envoltura de la aguja el cual se rompe en el momento de su uso.
- Técnica de afilado Precisión Glide™, Tri biselada, la cual produce menor dolor y menor lesión en el tejido ,garantizando mayor confort en el momento de la punción.
- Las agujas BD Vacutainer tienen un tapón de goma cubriendo el extremo opuesto al que esta en contacto con el paciente previniendo la fuga de sangre dentro del soporte durante la venopunción.
- Se utiliza con un soporte en el cual se introducen los tubos al vacío para la extracción de sangre y así evitar manipulación directa con al muestra y la aguja misma
- Compatible con el sistema de extracción de sangre al vacío BD Vacutainer.
- Vida útil cinco (5) años a partir de su fabricación
- **Conservación:** en un lugar seco y evitando temperaturas extremas
- Dispositivo de seguridad integrado a la aguja.

### Dispositivo de Bioseguridad



- Integrado a la aguja
- Alineado al bisel de la aguja
- Activable con una sola mano inmediatamente al salir de la zona de punción de forma intuitiva, evitando cualquier exposición accidental a la sangre por pinchazo o contacto
- Para su activación se presionar el dispositivo de seguridad con el dedo pulgar, protegiendo toda la aguja con un doble mecanismo, por lo que tanto el bisel como el cuerpo de la misma quedan neutralizados.
- Irreversible una vez activado
- Su correcta activación se confirma visual y audiblemente mediante un "clic"
- Compatible con cualquier sistema de extracción de sangre al vacío
- No cambia la técnica habitual de punción

## Presentaciones

Numero de Catalogo	Calibre	Presentación	Color	Registro Invima
368608	22 G x 1.25" = 22G x32mm	Caja por 48 Unds	Negro	2009DM-0003381
368607	21 G x 1.25" = 21G x32mm	Caja por 48 Unds	Verde	2009DM-0003381

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Complejo Logístico Industrial de Siberia CLIS. Vereda Vuelta Grande a 150 mts Glorieta Vía Siberia - Cota. Bodegas 56 y 57. Cota, Cundinamarca- Colombia. Tel: 7566060

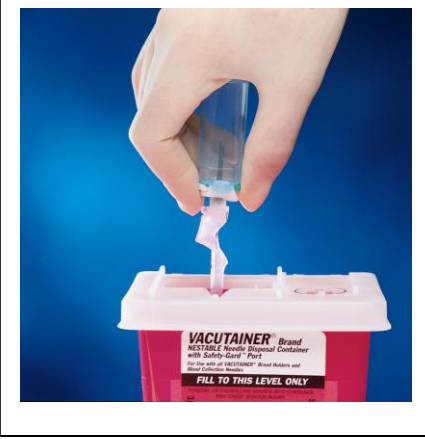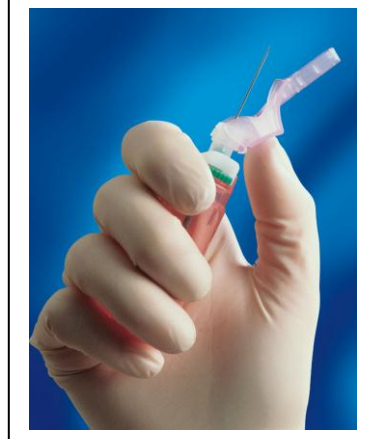

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**

Complejo Logístico Industrial de Siberia CLIS. Vereda Vuelta Grande a 150 mts Glorieta Vía Siberia - Cota. Bodegas 56 y 57.  
Cota, Cundinamarca- Colombia. Tel: 7566060