



Colombia

División Médicos
Venda Elastica
Coban

08/05/2002



Hoja Técnica

Descripción

La venda Coban de 3M es elastica y cohesiva, esta fabricada con material no tejido y fibras elasticas dispuestas longitudinalmente. Esta venda elastica contiene un material que la hace que se adhiera sobre si misma, pero no con otros materiales ni con la piel.

Composición

La venda Coban de 3M es elastica y cohesiva, esta fabricada con material no tejido y fibras elasticas dispuestas longitudinalmente. Esta venda elastica contiene un material que la hace que se adhiera sobre si misma, pero no con otros materiales ni con la piel.

Especificaciones (Características Técnicas)

N/A

Usos y Aplicaciones

La venda Coban, elastica y cohesiva, esta diseñada para proporcionar la compresion necesaria, proteccion de apositos y sujeccion de dispositivos a la piel. Este producto no esta diseñado para ser utilizado en otras aplicaciones, que no sean las indicadas.

Instrucciones de Uso

1. Desenrollar aproximadamente 30 centrimetros de venda Coban y mantengala sin tension.
2. Sin estirar, aplique una vuelta completa y presione ligeramente para sujetarla.
3. Continue aplicando tension a la venda sola, para obtener la compresion necesaria. Desenrollar mas venda Coban antes de dar la vuelta siguiente, para que el producto no se aplique con demasiada tension.
4. Al terminar la aplicacion de la venda Coban, corte el exceso y presione firmemente el extremo para asegurar su fijacion. **ADVERTENCIAS**

La zona de colocacion de la venda Coban debe inspeccionarse frecuentemente por si aparecen signos de inflamacion, dislocacion o deficiencia circulatoria.

Precauciones y Primeros Auxilios

1. La venda Coban no se desliza ni se afloja despues de una correcta colocacion. Se debe aplicar con la

- compresion adecuada.
2. La venda Coban no se debe colocar en contacto directo con heridas abiertas.
 3. Este producto contiene latex de caucho natural, el cual puede ocasionar reacciones alergicas.

Vida Util del Producto

La venda Coban tiene una vida util de 5 años.

Notas Especiales

Este producto debe ser almacenado a temperatura ambiente 15-30°C. Mantenerla en su empaque individual hasta su uso.

Condiciones de Transporte

N/A

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Si desea Enviar información a Nuestro E-Mail:servicioalcliente@mmm.com

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**