


HOJA TÉCNICA

Fabricante	Hangzhou Rollmed Co., Ltd.
Descripción del producto	Aguja Dental Desechable
Tamaño	27G, 30G
Indicación	La aguja dental se utiliza para inyectar el anestésico en la anestesia local dental
Contraindicación	Desechable. Destruir después del uso.

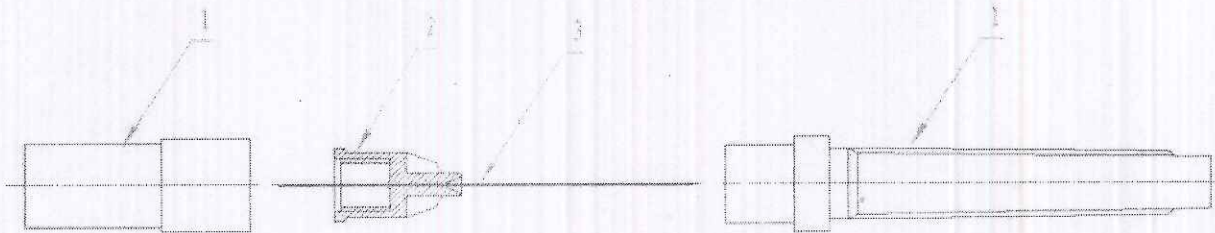

MATERIAL

1. Contenedor primario (dos)	Material: PP
2. Conector (Hub)	Material: PP
3. Tubo aguja	Material: Acero inoxidable

COMPOSICIÓN QUÍMICA

COMPONENTES	PORCENTAJE
Celulosa	0%
Agua	0%
Minerales (sales)	0%
Proteínas	0%
Pectinas	0%
Ceras	0%
Manchas de pigmentación	0%

PESO

COMPONENTES	PESO	PORCENTAJE DEL PRODUCTO
Contenedor primario (dos)	1.12 g ($\pm 0.03g$)	35 %
Conector (Hub)	1.23 g ($\pm 0.03g$)	38 %
Tubo aguja	0.85 g ($\pm 0.03g$)	27 %

VIDA ÚTIL

Vida Útil	5 años
-----------	--------

Hangzhou Rollmed Co., Ltd.

杭州乐宇医疗器械有限公司

Room 913, Yuanmao Mansion, No.5 Wen Er West Road
Xihu District, 310012 Hangzhou City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ADVERTENCIAS

- 1) Usar la aguja dental de acuerdo a las instrucciones y dentro del tiempo de la vida útil.
- 2) No se debe usar la aguja si presenta daños o deformaciones.
- 3) No se debe usar la aguja si los sellos se encuentran rotos o dañados.
- 4) Producto previsto para aplicar el anestésico en la anestesia local dental. Destruir después del uso.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Retirar la aguja dental del empaque.
- 2) Rotar el contenedor primario, ajustar la aguja a la jeringa.
- 3) Sacar el protector de la aguja. Realizar la inyección.
- 4) La aguja dental no es tóxica ni pirogénica.

EMPAQUES

Método de empaque	100 unidades/caja, 5000 unidades/carton
Tamaño caja	44.5 x 30 x 37cm
Peso bruto por caja	13 Kg
OEM	Disponible

ESTERILIZACIÓN

Método de esterilización	Oxido de Etileno (EO)
--------------------------	-----------------------