

CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

West Perclean AC
Desinfectante solido

DESCRIPCIÓN GENERAL

West Perclean AC es un desinfectante solido que al diluirse en agua genera una potente solución compuesta de ácido peracético y peróxido de hidrogeno.

Su característica solida garantiza la concentración del activo, disminuye los riesgos a los cuales se expone el personal de la limpieza al manipular productos químicos y permite un almacenamiento seguro.

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	30 segundos	99.999%
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Salmonella tiphymurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 16404)		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404)	5 minutos	

VIDA UTIL

2 años

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: NSOH00265-09C

ASPECTO

Polvo granular blanco.

COMPOSICIÓN

Peróxido de hidrogeno 5.75 %
Ácido peracético 15.75 %

MECANISMO DE ACCION

Su actividad desinfectante se da por la producción de destructivos radicales libres hidroxilos que pueden atacar la membrana lipídica, el ADN y otros componentes esenciales de la célula.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El West Perclean AC es un compuesto sólido estable en almacenamiento, produce ácido peracético solamente en solución, lo que garantiza la composición de ingrediente activo.
- Los riesgos asociados al transporte y almacenamiento se minimizan, ya que en forma sólida no desprende vapores y su condición de corrosividad es mínima.
- El West Perclean AC presenta una excelente capacidad microbicida. Los residuos de descomposición agua - oxígeno y ácido acético son compuestos orgánicos.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia





FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

Desinfección del ambiente hospitalario

MODO DE USO

Teniendo en cuenta que un gramo de producto diluido en un litro de agua entrega una solución desinfectante de 150 ppm se deben preparar de acuerdo a la ocasión de consumo de la siguiente manera:

- **Desinfección rutinaria** de superficies, pisos y paredes preparar una solución de 10 g equivalente a 1500 ppm de West Perclean AC en un litro de agua.
- **Desinfección terminal y de choque:** preparar una solución de 50 g para obtener una concentración de 7500 ppm de West Perclean AC en un litro de agua.
- Dejar en reposo por 20 minutos. Tener en cuenta que la agitación acelera la dilución del producto
- Para eliminar virus, bacterias y levaduras deje actuar por espacio mínimo de 30 segundos. Para eliminar hongos permita un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos
- Enjuague el producto cuando se estén interviniendo superficies metálicas.

RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Almacenar en el recipiente original y cerrado.
- Evite el contacto directo con la piel húmeda.
- No mezclar con otros productos químicos

- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto
- Para temas de Seguridad, referirse a la Hoja de Seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Contacto con los ojos**
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste consultar al médico.
- **Contacto con la piel**
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.
- **Ingestión**
No inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el producto.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Envase rígido (3 kg)

PARTIDA ARANCELARIA

38.08.94.19.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

