



División Hospitalaria

Cinta Quirúrgica Medipore™ H

03/08/2012



Ficha Técnica

Descripción

Cinta médica color blanco con respaldo en tela de sontara, hipoalergénica y líner de respaldo

Características y Beneficios

- Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma
- Alta conformabilidad con una moderada elongación, para ser aplicada en protuberancias o articulaciones minimizando el riesgo de causar daño a la piel
- Su respaldo permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y se mantenga el intercambio gaseoso de la piel
- Líneas guía de corte en el líner, facilita el corte de la cinta a diferentes aplicaciones o tamaños
- Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo.
- Resistente al agua y de buen desempeño en pieles húmedas o sudorosas
- Excelente adhesión, suave con la piel ofreciendo comodidad incrementada al paciente, de fácil remoción con bajo compromiso de la integridad de la piel
- Adhesivo sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo
- Fácil de usar. Se maneja fácilmente sin ondularse o pegarse ofreciendo un uso más conveniente
- Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente

Composición:

- Respaldo: Fibra no tejida poliéster
- Tratamiento: Caucho sintético, LAB, Uretano
- Adhesivo: Acrilato. Hipoalergénico y sensible a la presión
- Líner: Papel siliconado





Usos y aplicaciones

La cinta médica Medipore™ H está recomendada para fijar vendajes, inmovilización y uso general en aplicaciones como:

- Curaciones generales, cirugía plástica, oftálmica, otorrino y curaciones menores
- Indicado en pieles delicadas o frágiles como las de los pacientes neonatos, geriátricos, pediátricos y oncológicos bajo quimioterapia o radiación
- Fijación de dispositivos en general, tales como líneas de catéteres centrales y periféricos, sondas, drenes, tubos oro traqueales, entre otros
- Recomendado para fijación de vendajes con alta frecuencia de cambio
- Aseguramiento de los bordes de las bolsas de ostomía o dispositivos que lo requieran

Instrucciones de uso

- Corte o adapte el tipo y el tamaño adecuado de cinta para la aplicación; la cinta debe exceder al menos 2 cm más allá del límite del apósito o dispositivo. Utilice las líneas guía de corte impresas en el liner para ajustar la cinta al tamaño requerido
- Recorte el vello si es necesario
- Aplique la cinta siempre sobre la piel limpia y seca
- Desprenda el liner de la cinta, evitando tocar el adhesivo de la cinta
- Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión
- Si la cinta es colocada sobre una articulación posicione anatómicamente la zona del cuerpo antes de adherirla

Nota: El uso de películas protectoras sobre la piel del paciente antes de aplicar una cinta médica es recomendable para proteger la piel en el momento de la remoción

Para remover la cinta:

- Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en técnica de corto y lento en la dirección del crecimiento del vello corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella
- La remoción puede ser facilitada haciendo uso de un removedor de adhesivo de uso médico o una loción humectante aplicada en el punto de remoción de la cinta

Precauciones y advertencias

- No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel tales como desprendimiento epidérmico
- Las cintas médicas son productos limpios, pero no estériles. Por lo tanto, no deben ser aplicadas directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV.
- Elija la cinta adecuada de acuerdo a las características del dispositivo, la piel del paciente y el tiempo de aplicación requerido
- El producto puede ser esterilizado en forma de tiras según la medida que se requiera, utilizando procesos a baja temperatura con base en óxido de etileno. No esterilice el producto en los rollos originales



Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

Vida útil del producto:

La cinta médica tiene 2 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	Referencia	Und. / Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
LH-0000-1220-3	3M™ Medipore™ H 5cm x 10m	1	2006DM-0000246	I
LH-0000-1221-1	3M™ Medipore™ H 10cm x 10m	1	2006DM-0000246	I
LH-0000-1222-9	3M™ Medipore™ H 15cm x 10m	1	2006DM-0000246	I

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co

Contáctenos

email: 3mcontacto@mmm.com

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá

01-8000-113636 Resto del País