

## División Hospitalaria

### Cinta Médica Transpore™

1527

28/10/2011

### Ficha Técnica



### Descripción

Cinta médica transparente de polietileno macro-perforada hipoalergénica

### Características y Beneficios

- Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex.
- Su respaldo macro-perforado permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel
- Alta adherencia inicial en la piel seca que se mantiene por 24 - 48 horas
- De fácil manejo, se puede manipular incluso con guantes. Permite cortarse fácilmente tanto en dirección transversal como longitudinal en tiras delgadas sin necesidad de usar tijeras
- Transparente, permite monitorear la piel sin necesidad de remover la cinta
- El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo
- Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo.
- Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente

### Composición:

- Respaldo: Polietileno macro perforado de baja densidad
- Adhesivo: Adhesivo de acrilato. Hipoalergénico y sensible a la presión





## Usos y aplicaciones

La cinta quirúrgica Transpore™ está recomendada para una fijación rápida y efectiva, por un período corto de tiempo entre 24-48 horas y para el uso general en aplicaciones como:

- Estabilización de tubos, líneas de catéteres intravenosos, apósitos y dispositivo de uso médico livianos
- Salas de cirugía para inmovilización de tubo orotraqueal, cierre de párpados e inmovilización de dispositivos, como sensores de temperatura, líneas, etc
- Cuando se requiere adaptar el ancho de la cinta a la situación clínica que se desea resolver
- Aplicaciones que requieran observar la piel del paciente bajo la cinta
- Ideal en servicios de urgencias en donde se requiere una manipulación rápida sin cortar con tijeras

## Instrucciones de uso

- Se recomienda aplicar la cinta sobre la piel limpia, seca y libre de jabones, químicos o aceites
- Corte el vello si es necesario
- Seleccione el tipo y el tamaño adecuado de cinta para la aplicación; la cinta debe exceder al menos 2 cm más allá del límite del apósito o dispositivo
- Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión
- Evite tocar el adhesivo de la cinta
- Si la cinta es colocada sobre una articulación posicione anatómicamente la zona del cuerpo antes de adherirla
- Utilice tijeras para un borde más preciso

*Nota: El uso de películas protectoras sobre la piel del paciente antes de aplicar una cinta quirúrgica es recomendable para proteger la piel en el momento de la remoción*

*Para remover la cinta:*

- Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en forma lenta y en la dirección del crecimiento del pelo corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella
- Inicie la remoción de la cinta con un trozo pequeño de cinta aplicada en una de las esquinas de la cinta adherida
- La remoción puede ser facilitada haciendo uso de un removedor de adhesivo de uso médico o una loción humectante aplicada en el punto de remoción de la cinta

## Precauciones y advertencias

- No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel tales como desprendimiento epidérmico
- No se recomienda el uso de sustancias como la tintura de benjuí, antes de la aplicación de las cintas. Este tipo de sustancias pueden causar irritaciones en la piel
- Las cintas quirúrgicas son productos limpios, pero no estériles. Por lo tanto, no deben ser aplicadas directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV.
- Elija la cinta adecuada de acuerdo a las características del dispositivo, la piel del paciente y el tiempo de aplicación requerido
- Si requiere esterilizar la cinta, se recomienda esterilizar el producto cortado en tiras para garantizar el proceso. No se recomienda esterilizar el material en rollo. Esterilice el producto a baja temperatura con Óxido de etileno, no con vapor o con peróxido de hidrógeno



## Almacenamiento y vida útil

### Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

### Vida útil del producto:

La cinta quirúrgica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

## Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

## Presentación

Stocknumber	Referencia	Producto	Rollo/ Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
702000739574	1527 -1/2"	Transpore™ Rollos 12mm (1/2") x9.1m	24	INVIMA 2007DM-0000798R1	I
702000739582	1527 -1"	Transpore™ Rollos 24mm (1") x9.1m	12	INVIMA 2007DM-0000798R1	I
702000739590	1527 -2"	Transpore™ Rollos 48mm (2") x9.1m	6	INVIMA 2007DM-0000798R1	I
702000739608	1527 -3"	Transpore™ Rollos 72mm (3") x9.1m	4	INVIMA 2007DM-0000798R1	I

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93  
(571) 4161666 PBX  
(571) 4161677 Fax  
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: [www.3m.com.co](http://www.3m.com.co)

Contáctenos

email: [3mcontacto@mmm.com](mailto:3mcontacto@mmm.com)

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá  
01-8000-113636 Resto del País