



**FICHA TÉCNICA  
NATURA™ DURAHESIVE™  
BARRERA MOLDEABLE PROTECTORA DE PIEL – REBORDE EN  
ACORDEÓN**

**PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.**

<b>PRODUCTO</b>	
Nombre Genérico	<b>Barrera Moldeable con Adaptador para la Reducción de Presión (Accordion Flange)</b>
Nombre Comercial	<b>Natura™ Durahesive™ Barrera Moldeable Protectora de Piel – Reborde en Acordeón.</b>
Descripción	Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para el manejo de descargas del estoma mayormente líquidas. A diferencia de otras barreras que se desintegran al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se expanden para proteger el estoma. Este efecto es llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. Las barreras Durahesive también son fáciles de acoplar, de aplicar y retirar. Se adherirán de forma segura a la piel en actividades en las que el contacto con el agua es mayor, tales como tomar duchas y nadar. La barrera de piel moldeable Natura con Reborde en Acordeón permite que los dedos sean colocados entre la barrera de piel y el reborde para acoplar la bolsa al reborde sin generar presión sobre el abdomen o el estoma.
Marca	Natura™, Durahesive™, Accordion Flange™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Consisten de un anillo de soporte plano delgado de plástico (LDPE, siglas en inglés de Polietileno de baja densidad), adherido a un disco Durahesive (del lado del cuerpo) / Durahesive (del lado de la pestaña) trilaminado o coextruido con una lámina de polietileno en relieve en el centro. Se posiciona un collar (fibra recubierta de adhesivo hidrocoloide/adhesivo acrílico de fibra de poliéster) sobre el anillo de soporte y posteriormente una pestaña del lado del cuerpo (LDPE con colorante beige), en la parte superior. La pestaña, el collar y el anillo están adheridos entre sí. Una fina capa de liberación removible (poliestireno) cubre totalmente el lado adhesivo de la barrera. El adaptador para la reducción de presión consiste en una pestaña de etilenvinil acetato.
Características y Acciones del Producto	Las barreras Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son mayormente líquidas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adhesión:</b> Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. El adhesivo es fácil de usar y enseñar a usar ya que se moldea fácilmente a cualquier tamaño de estoma.</li> <li>• <b>Protección de la piel:</b> A diferencia de otras barreras que se pueden desintegrar al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se ensanchan para proteger el estoma. Este efecto especial llamado cuello de tortuga, ayuda a que la barrera se ajuste de forma personalizada a cada estoma reduciendo la incidencia de fugas sin lesionar la piel.</li> <li>• <b>Aplicación:</b> Las barreras Durahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar debido a que cuentan con una pestaña que garantiza un cierre preciso mediante una serie de clics audibles.</li> <li>• <b>Seguridad:</b> La Tecnología de Memoria de Rebote ayuda a que se mantenga la forma</li> </ul>



	<p>moldeada alrededor del estoma, creando un sello seguro alrededor del mismo. De igual manera, las barreras con Tecnología Moldeable de ConvaTec se expanden y contraen con el funcionamiento del estoma, manteniendo un sello seguro durante el uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Practicidad:</b> La Tecnología Moldeable de ConvaTec elimina la necesidad de cortar la barrera y por lo tanto, puede reducir la necesidad de usar accesorios adicionales para obtener un sello seguro alrededor del estoma. De igual manera, una vez aplicada a la piel, la porción de adhesivo se puede manipular y desenrollar para abrazar el estoma con el fin de asegurarlo correctamente.</li> </ul>
<b>Usos</b>	Para el manejo de las descargas del estoma
<b>Recomendaciones de Uso</b>	<p>Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preparación de la piel</b> Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.</li> <li>• <b>Preparación del protector de la piel</b> No retire la cubierta transparente ni el protector antiadhesivo del protector de la piel. El protector de la piel se debe amoldar a la forma y al tamaño del estoma sin necesidad de utilizar tijeras. Para personalizar la abertura del estoma, coloque sus pulgares (o dedos) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar el adhesivo. Use sus pulgares (o dedos) para seguir enrollando el adhesivo hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados para su estoma. El adhesivo debe enrollarse. No estire, no tire y tampoco corte el adhesivo para hacerlo más grande. Aplique de inmediato luego de moldear.</li> <li>• <b>Aplicación del protector de la piel</b> Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel; Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma; Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas; Con movimientos circulares, mantenga presionado el adhesivo contra el estoma durante 30 segundos. Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta seguro. El tiempo de uso puede variar.</li> <li>• <b>Remoción</b> Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera</li> </ul>
<b>Registro Sanitario</b>	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
<b>Presentaciones:</b>	<p>Caja x 10 barreras cutáneas. Están disponibles en los siguientes tamaños:</p> <p>Para estomas entre los 13-22mm (pequeños), pestañas de 57mm</p> <p>Para estomas entre los 22-33mm (medianos), pestañas de 57mm</p> <p>Para estomas entre los 33-45mm (grandes), pestañas de 70mm</p>