

# BD Safe-Clip™

## Descripción de producto:

Cortador de agujas de jeringas de insulina o agujas para PEN de forma automática y segura reteniéndolas dentro del dispositivo de almacenamiento, admite hasta 1500 agujas cortadas en forma segura y sencilla. Diseñado para el uso personal de aquellos pacientes que necesitan desechar las agujas usadas dentro y fuera de su casa.

### Características Generales

**Cortador de agujas:** Se pueden cortar agujas desde 28G hasta 31G sin dificultad y de 4mm a 13 mm de largo.

**Contenedor:** Almacena hasta 1.500 agujas. Previene a las personas de pinchazos accidentales que pueden causar infecciones graves.

**Fácil de llevar:** No ocupa mayor espacio y es seguro de cargar por ser hermético.

**Descarte:** Debe disponerse en un contenedor de objetos cortopunzantes una vez este lleno de agujas.

**Vida útil a partir de su fabricación:** 5 Años.

### Condiciones de almacenamiento:

Condiciones normales, manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

### Clasificación de Riesgo: I

**Referencia:** 328235

**Presentación:** Caja por 1 Unidad

**Certificación:** INVIMA 2011065539



Presionar los dos lados al mismo tiempo donde lo indican las flechas para abrir el dispositivo BD Safe-Clip



Insertar totalmente la aguja en el orificio y luego empuje hacia abajo con la presión con el pulgar mientras sujeta con los demás dedos la parte inferior del dispositivo hasta escuchar un clip que indica que la aguja fue cortada y el dispositivo se encuentra cerrado.



Para cortar la siguiente aguja repita el procedimiento desde el principio.

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Complejo Logístico Industrial de Siberia Vereda Vuelta Grande 150 metros Glorieta Vía Siberia – Cota Bodegas 56 y 57 PBX (571) 7566060