



**FICHA TÉCNICA
SUR-FIT NATURA™ DURAHESIVE™
BARRERA MOLDEABLE CONVEXA**

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Barrera Moldeable Convexa
Nombre Comercial	Sur-Fit Natura™ Durahesive™ Barrera Moldeable Convexa
Descripción	La Barrera Cutánea SUR-FIT Natura Durahesive Moldeable Convexa es una barrera cutánea convexa con un adhesivo que puede ser moldeado hasta adquirir la forma y el tamaño del estoma, sin necesidad de usar tijeras. La Barrera Cutánea SUR-FIT Natura Durahesive Moldeable Convexa debe ser usada junto con las bolsas SUR-FIT Natura. Al ser convexa esta barrera permite manejar estomas planos, invaginados o retraídos.
Marca	Natura™, Durahesive™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Consiste de una pestaña natural (LDPE) unida a un disco convexo delgado (etilenvinil acetato). Un collar cuadrado (adhesivo acrílico de fibra de poliéster) se acopla entre los bordes exteriores de la pestaña y el disco. Una capa de liberación de poliestireno translúcido cubre el borde adhesivo y de la cinta.
Características y Acciones del Producto	Las barreras Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son mayormente líquidas. <ul style="list-style-type: none"> • Adhesión: Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. • Protección de la piel: A diferencia de otras barreras que se pueden desintegrar al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se ensanchan para proteger el estoma. Este efecto especial llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. • Aplicación: Las barreras Durahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar debido a que cuentan con una pestaña que garantiza un cierre preciso mediante una serie de clics audibles.
Usos	Para el manejo de las descargas del estoma
Recomendaciones de Uso	Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo. La piel que rodea el estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas. Preparación del protector de la piel No retire la cubierta transparente ni el protector antiadhesivo del protector de la piel. El protector de la piel se debe amoldar a la forma y al tamaño del estoma sin necesidad de utilizar tijeras. Para personalizar la abertura del estoma, coloque sus pulgares (o dedos) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar el adhesivo. Use sus pulgares (o dedos) para seguir enrollando el adhesivo hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados para su estoma. El adhesivo debe enrollarse. No estire, no tire y tampoco corte el adhesivo para hacerlo más grande. Aplique de inmediato luego de moldear. Aplicación del protector de la piel



	<p>Retire el protector antiadhesivo del protector de la piel; coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma; aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas; con movimientos circulares, mantenga presionado el adhesivo contra el estoma durante 30 segundos.</p> <p>Remoción Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera</p>
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
Presentaciones:	Caja x 10 barreras cutáneas. Están disponibles en los siguientes tamaños: Para estomas entre los 13-22mm, pestaña de 45mm Para estomas entre los 22-33mm, pestaña de 45mm Para estomas entre los 33-45mm, pestaña de 57mm



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
SUR-FIT NATURA™ DURAHESIVE™
BARRERA MOLDEABLE CONVEXA**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Adhesión	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Protección de la piel	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Resistencia al efluente	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Adaptabilidad a estomas planos, invaginados o retraídos	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Facilidad para amoldarse al estoma	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Facilidad de remoción	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Duración	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Comodidad para el paciente	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Empaques	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Claridad de las instrucciones de uso	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Presentación	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					