

## FIXAPRO I.V. ADVANCED

### DESCRIPCION

Apósito transparente estéril compuesto de una película de poliuretano ultra-delgada que permite el intercambio gaseoso de la piel, adhesivo de acrilato sensible a la presión, una capa de poliéster no-tejido - reforzado, ranurado para estabilización de catéteres y tirillas de sujeción. También posee un papel de soporte (liner) siliconado y marco de aplicación que facilitan su desprendimiento y colocación al paciente.

**FIXAPRO I.V. Advanced** es preferido por los médicos para proteger y asegurar catéteres en una amplia variedad de entornos; gracias a su amplia gama de tamaños, formas y sistemas de administración, proporcionan una solución óptima para cada necesidad de apósito transparente, tanto para el profesional como para el paciente.

### ALCANCE

**FIXAPRO I.V. Advanced** está diseñado para proteger, asegurar y estabilizar diferentes tipos de catéteres intravasculares (periféricos, centrales incluyendo catéteres implantables, PICC y tunelizados) y otros dispositivos médicos (tubos, sondas, etc); en pacientes con diaforéticos y/o en condiciones de humedad elevada.

### PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDADES FISICAS	VALOR ESTANDAR	UNIDAD	ESTANDAR DE PRUEBA
Vapor de humedad Velocidad de transmisión.	>500	g/24 horas/m <sup>2</sup>	EN 13726-2
Extensibilidad	<5 <2	N / cm	EN 13726-4
Cortado de la adhesión No tejido PU	<2.5 (peso: 500 g / 2,5 cm, de mantenimiento: 30min) <2.5 (peso: 1000 g / 2,5 cm, de mantenimiento: 30min)	mm	ASTM D3654
Resistencia al desprendimiento 180°	>1	N / cm	ASTM D903



**MÉTODO DE ESTERILIZACION:** Óxido de Etileno

**VIDA ÚTIL:** 3 años.

## **EMPAQUE**

Empaque individual por apósito, con sistema abre-fácil.  
Adhesivo recubierto de papel laminado a la película del PE / PET.

## **PRESENTACIONES**

<b>REFERENCIAS</b>	<b>DIMENSIONES</b>
<b>20-001</b>	<b>8,5cmx11,5cm</b>
<b>20-002</b>	<b>5cmx5,7cm</b>
<b>20-003</b>	<b>8,7cmx10,5 cm</b>
<b>20-004</b>	<b>10cmx15,5cm</b>
<b>20-015</b>	<b>6,5cmx7cm</b>

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Colocación**

- Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de la institución.
- Limpie la herida y el área de aplicación.
- Remueva el producto de su empaque.
- Remueva el liner para exponer la superficie adhesiva.
- Centre el dispositivo sobre el sitio de colocación y/o fíjelo al catéter.
- Aplique presión moderada al dispositivo, para una mejor adherencia.
- Remueva el marco de aplicación, aplicando una presión suave a los bordes del dispositivo.
- Para los dispositivos que poseen un label, registrar la información y colocarla en o cerca del dispositivo.

### **Remoción**

- Para remover, tome un borde del dispositivo y suavemente retírelo en la dirección del crecimiento del bello.
- Para remover el dispositivo cuando está sujetando catéteres u otros dispositivos, tome un borde y retire el apósito suavemente con un ángulo de 180°.
- Se debe tener precaución de no descolocar el catéter u otro dispositivo.
- Proporcione soporte a la piel o al catéter mientras retira el dispositivo.