

FIXAPRO FILM

DESCRIPCION

Los apósitos transparentes **FIXAPRO** se componen de una película ultra delgada de poliuretano y adhesivo en acrilato sensible a la presión, liner y marco de aplicación.

Poseen una membrana semipermeable que permite un buen intercambio de oxígeno y vapor húmedo, es resistente al agua e impermeable a líquidos, suciedad y fluidos corporales, proporcionando una barrera eficaz contra diversos tipos de bacterias o virus, siempre que permanezcan intactos y sin filtraciones o fugas; protegiendo al usuario contra la contaminación externa en la zona de aplicación.

Puede ser colocado fácilmente en forma precisa y segura, incluso con una sola mano, gracias a su marco de aplicación.

ALCANCE

FIXAPRO FILM está destinado para la:

- Fijación de catéteres
- Protección y cobertura de catéteres
- Protección y cobertura de heridas
- Apósito secundario en heridas
- Protección de la piel en riesgo de daño por roce y fricción
- Fijación de dispositivos a la piel
- Protección de quemaduras de primero y segundo grado

PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDAR	ESTANDAR DE PRUEBA
Vapor de humedad Velocidad de transmisión.	> 500 g / 24 horas / m2	EN 13726-2
Cortado de la Adhesión	< 2,5 mm (peso: 1000 g / 2,5 cm, de mantenimiento: 30min)	ASTM D3654
Resistencia al desprendimiento 180°	≥ 1 N / cm	ASTM D903
Extensibilidad	<5%, <2N/cm	EN 13726-4



MÉTODO DE ESTERILIZACION: Óxido de Etileno

VIDA ÚTIL: 3 años.

EMPAQUE

Empaque individual por apósito, con sistema abre-fácil.
Adhesivo recubierto de papel laminado a la película del PE / PET.

PRESENTACIONES

REFERENCIAS	DIMESIONES
20-006	4cmx4cm
20-007	6cmx7cm
20-008	10cmx12 cm
20-009	10cmx11,5cm
20-010	10cmx25cm
20-011	15cmx20cm
20-012	20cmx30cm

INSTRUCCIONES DE USO

Colocación

- prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de la institución.
- Limpie la herida y el área de aplicación.
- Remueva el producto de su empaque.
- Remueva el liner para exponer la superficie adhesiva.
- Centre el dispositivo sobre el sitio de colocación y/o fíjelo al catéter.
- Aplique presión moderada al dispositivo, para una mejor adherencia.
- Remueva el marco de aplicación, aplicando una presión suave a los bordes del dispositivo.
- Para los dispositivos que poseen un label, registrar la información y colocarla en o cerca del dispositivo.

Remoción

- Para remover, tome un borde del dispositivo y suavemente retírelo en la dirección del crecimiento del bello.
- Para remover el dispositivo cuando está sujetando catéteres u otros dispositivos, tome un borde y retire el apósito suavemente con un ángulo de 180°.
- Se debe tener precaución de no descolocar el catéter u otro dispositivo.
- Proporcionales soporte a la piel o al catéter mientras retira el dispositivo.