

Alkacide®

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL POTENCIALIZADO

NO REQUIERE ACTIVADOR

Indicado para realizar procedimientos de desinfección de Alto Nivel por inmersión de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, equipos biomédicos.

Alkacide® es una formulación de glutaraldehído potencializado.

- Inicio de acción inmediato.
- Tiempo total de contacto requerido sólo 15 minutos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Frasco de 80 mL.
- Frasco de 1L con dosificador integrado.

FÓRMULA

Alkacide® concentrado contiene: Glutaraldehído potencializado al 10,5% (8,5% glutaraldehído + 2% tensoactivo catiónico).

Alkacide® una vez diluido a 2% en la solución lista para usar, contiene sólo 0,17% de glutaraldehído.

REGISTRO SANITARIO

INVIMA No. 2017DM-0016110.

PREPARACIÓN

1. Llene un recipiente limpio con 1L de agua potable.
2. Presione el frasco de Alkacide® por los costados hasta llenar la cámara dosificadora con 20 mL.
3. Vierta el contenido del dosificador (20 mL) en el recipiente con agua.
4. Mantenga la mezcla de trabajo lista para usar en un recipiente con tapa.
5. Registre la fecha de preparación para mayor control y rendimiento.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Los recipientes que contengan la solución de Alkacide® lista para uso, deberán mantenerse cubiertos para evitar derrames, contaminaciones, entre otras situaciones.
2. Utilice elementos de protección personal para la manipulación de la solución.
3. Ver hoja de seguridad en www.alkamedica.com.

CONSIDERACIONES DEL PRODUCTO

- La solución preparada de Alkacide® es reutilizable y tiene una duración máxima de 30 días. Debe ser reemplazada inmediatamente si presenta turbidez, cambio en la coloración o cuando sea necesario.
- Alkacide® es de fácil manipulación. Se diluye directamente en agua potable. No requiere activación, ni tiras de verificación de concentración de Glutaraldehído.

MODO DE USO: Ver al respaldo.

SEGURIDAD



No tóxico.
No irritante.



No corrosivo.
No mancha.



Utilizar elementos
de protección
personal.



Producto **100% amigable con el ambiente**.
Producto **100% biodegradable**. Se puede verter por los sifones y las rejillas de desagüe sin riesgo de contaminación ambiental.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Actividad Bactericida:

EN 1040 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* al 0.125% en 5 minutos.

EN 13727 *Pseudomonas aeruginosa* al 0.25%, *Staphylococcus aureus*, *Esterococcus hirae* al 0.075% en 15 minutos.

NF T 72-171 *Pseudomonas aeruginosa* al 0.5%, *Staphylococcus aureus* 0.125%, *Escherichia coli* al 1%, *Enterococcus hirae* al 0.125% en 5 minutos.

Protocolo GERMANDE (ALKAZYME 0.5% en 15 min) *Pseudomonas aeruginosa* al 2% en 15 minutos.



Actividad Tuberculicida:

NF T 72-301 *Mycobacterium tuberculosis* al 5% en 60 minutos.

NF T 72-301 (previo tratamiento con Alkazyme al 0.5%) *Mycobacterium smegmatis* al 0.5%, *Mycobacterium tuberculosis* al 2%, *Mycobacterium avium* 5% en 15 minutos.

Actividad Fungicida:

EN 1275 *Candida albicans* 0.5%, *Aspergillus niger* al 5% en 15 minutos.

NF T 72-301 con sustancias interferentes *Candida albicans* al 0.125%, *Penicillium verrucosum* al 1%, *Cladosporium cladosporioides* al 0.25%, *Aspergillus fumigatus* 2% en 15 minutos.

Actividad Virucida:

NF T 72-180 *Entérovirus polio 1*, *Adénovirus* tipo 5, *Orthopoxvirus de la vaccine* al 2% 15 minutos.

HIV-1 al 0.5% en 5 minutos.

AFNOR NF T 72-180 Hepatitis B (HBr) y Hepatitis C (HCV) al 1% en 5 minutos.

EUCAST 2011. *Morbilivirus* (ATCC CCL - 34). *Paramyxoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

CLSI 2012. *Parvovirus* (ATCC VR - 2209). *Parvoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

NF T 27-185 y NF EN 14476+A1 *Herpes virus* tipo 1 y *Rotavirus Ceba Wa* al 1% en 5 minutos.

Actividad Esporicida:

NF T 72-230 *Bacillus subtilis var niger* al 5% en 60 minutos.

Actividad contra Priones

Kimberli & Walker (1967), Adjou et al. (1995), Lasmézas et al. (1996) ATNC 263K al 0.5% en 5 minutos.

ALKAMEDICA S.A.S.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR
PARA COLOMBIA DE ALKAPHARM FRANCIA.

Servicio al cliente:

Manizales: (6) 889 44 60 - (6) 889 44 57 - 301 571 1865
Bogotá: (1) 432 70 95 - 301 206 9493

Línea gratuita nacional: 01 8000 41 3707

servicioalcliente@alkamedica.com

Km 4 vía Panamericana, Parquecentro Bodega 9B
Colombia.

Síguenos en



Alkacide®

MODO DE USO



1.

Llene un recipiente limpio y con tapa con 1L de agua potable.



2.

Presione el frasco de **Alkacide®** por los costados hasta llenar la cámara dosificadora con 20 mL.



3.

Vierta el contenido del dosificador (20 mL) en el recipiente con agua.



4.

Sumerja completamente los dispositivos (previamente lavados con **Alkazyme®** y secados) en la solución de **Alkacide®** y deje actuar durante 15 minutos.



5.

Enjuague con abundante agua estéril o destilada, transcurrido el tiempo de inmersión.



6.

Proceda con el secado de los dispositivos y manipule con técnica estéril.

- Los dispositivos médicos, material, entre otros, que hayan sido previamente lavados y descontaminados con **Alkazyme®**, deben estar abiertos, desmontados y secos antes de ser sumergidos en la solución de trabajo de **Alkacide®**
- El secado de partes huecas o complejas se hará por insuflación de aire puro o estéril, según sea el caso. Mantenga la solución de trabajo lista para usar en un recipiente con tapa. Duración máxima de 30 días.