

Surfalkan SH[®]

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

LISTO PARA USAR

Diseñado para realizar limpieza y desinfección de manera rápida y en una sola aplicación, de superficies de alto contacto, elevadas y estructurales, mobiliario, conexiones, circuitos de medios hospitalarios y odontológicos, inicio de acción inmediato.

- Detergente desinfectante de superficies listo para usar con aspersión (spray). La acción potente y rápida de Surfalkan[®] se basa en la asociación combinada de agentes limpiadores humectantes y activos antimicrobianos que desprenden las manchas y desinfectan rápidamente las superficies tratadas, en cualquier rutina de limpieza y desinfección efectiva a nivel hospitalario y odontológico.
- Su formulación genera en la aplicación una espuma ligera no adhesiva que permite un mejor manejo en el área de limpieza.
- Limpia y desinfecta superficies sin deteriorar los materiales.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Presentación en frasco de 750 mL con aspersor.

FÓRMULA

Alcohol Etilico (30,50 g/kg) + Cloruro de Alquilbencildimetilamonio (4 g/kg). (Amonio cuaternario de última generación).

CERTIFICACIÓN SANITARIA

INVIMA No. 2017001293.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

- Color: Incoloro.
- Estado físico: Líquido (al ser aplicado se genera una espuma ligera no adhesiva).
- Perfume: Pomelo.
- pH: 5 ± 0,5.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para limpieza y desinfección con precaución y con los elementos de protección personal.
2. Conserve el recipiente bien cerrado y en un lugar seco.
3. No use para el lavado de instrumental o de dispositivos médicos.
4. Ver hoja de seguridad en www.alkamedica.com

MODO DE USO: Ver al respaldo.

SEGURIDAD



No tóxico.
No irritante.
No sensibilizante.
No contiene sustancias alérgicas.



No corrosivo.
No mancha.
Sin EDTA y sin NTA.



Utilizar elementos de protección personal.



Producto **100% amigable con el ambiente.**
Producto **100% biodegradable**, que no genera bioacumulación.



PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Actividad Bactericida:

EN 1276. *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, en 30 segundos.

EN 13697. *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, en 5 minutos.

Actividad Fungicida:

EN 1650. *Candida albicans* en 1 minuto.

EN 13697. *Candida albicans* en 1 minuto.

Actividad Virucida:

EN 14476. *Norovirus*, *Rotavirus* en 5 minutos.

EUCAST 2011. *Morbilivirus* (ATCC CCL - 34). *Paramyxoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

CLSI 2012. *Parvovirus* (ATCC VR - 2209). *Parvoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

Actividad Esporicida:

EN 13704. *Clostridium difficile* en 15 minutos.

ALKAMEDICA S.A.S.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR
PARA COLOMBIA DE ALKAPHARM FRANCIA.

Servicio al cliente:

Manizales: (6) 889 44 60 - (6) 889 44 57 - 301 571 1865

Bogotá: (1) 432 70 95 - 301 206 9493

Línea gratuita nacional: 01 8000 41 3707

✉ servicioalcliente@alkamedica.com


📍 Km 4 vía Panamericana, Parquecentro Bodega 9B
Colombia.

Síguenos en    



Surfalkan SH[®]

MODO DE USO

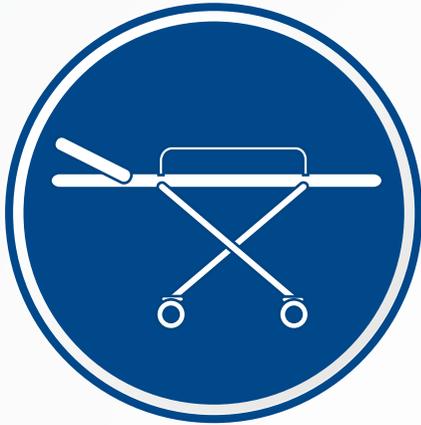

1.

Asegúrese de que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.




2.

Aplice el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.




3.

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.

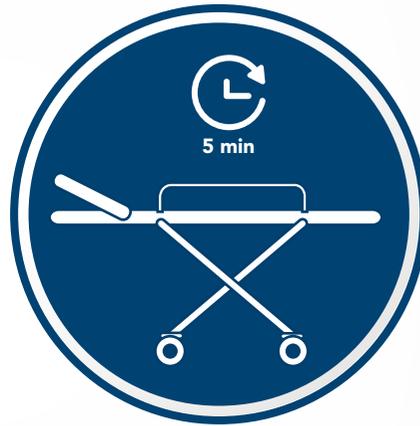

4.

Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.

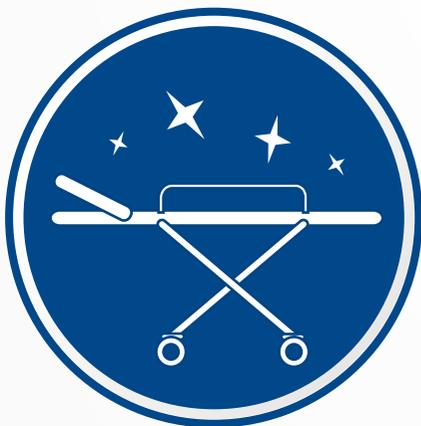

5.

No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.

- Aplique **Surfalkan[®]** directamente sobre toda la superficie que desea limpiar y desinfectar.
- Compatible con la mayoría de los materiales.