

FIXAPRO I.V. ADVANCED

MARCA: FIXAPRO / Maff Health

DESCRIPCIÓN: Apósito transparente estéril compuesto de una película de poliuretano ultra-delgada que permite el intercambio gaseoso de la piel, adhesivo de acrilato sensible a la presión, una capa de poliéster no-tejido - reforzado, ranurado para estabilización de catéteres y tirillas de sujeción. También posee un papel de soporte (liner) siliconado y marco de aplicación que facilitan su desprendimiento y colocación al paciente.

FIXAPRO I.V. Advanced es preferido por los médicos para proteger y asegurar catéteres en una amplia variedad de entornos; gracias a su amplia gama de tamaños, formas y sistemas de administración, proporcionan una solución óptima para cada necesidad de apósito transparente, tanto para el profesional como para el paciente.

PRESENTACIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	Registro Invima N°
20-001	Fixapro IV Advanced 8.5 cm x 11.5cm	1/pk, 50/caja, 24/cartón	2016DM-0015415
20-002	Fixapro IV Advanced 5.0 cm x 5.7 cm	1/pk, 100/caja, 30/cartón	
20-003	Fixapro IV Advanced 8.7 cm x 10.5 cm	1/pk, 50/caja, 4/cartón	
20-004	Fixapro IV Advanced 10.0 cm x 15.5 cm	1/pk, 40/caja, 5/cartón	
20-005	Fixapro IV Advanced 6.5 cm x 7.0cm	1/pk, 100/caja, 4/cartón	

INDICADO PARA:

FIXAPRO I.V. Advanced está diseñado para proteger, asegurar y estabilizar diferentes tipos de catéteres intravasculares (periféricos, centrales incluyendo catéteres implantables, PICC y tunelizados) y otros dispositivos médicos (tubos, sondas, etc.); en pacientes con diaforéticos y/o en condiciones de humedad elevada.

ESPECIFICACIONES

ESTERILIDAD: Óxido de etileno (EO)
VIDA ÚTIL: 3 años.

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FISICAS	VALOR ESTANDAR	UNIDAD	ESTANDAR DE PRUEBA
Vapor de humedad Velocidad de transmisión.	>500	g/24h /m2	EN 13726-2
Extensibilidad	<5 <2	N / cm	EN 13726-4



Cortado de la adhesión No tejido PU	<2.5 (peso: 500 g / 2,5 cm, de mantenimiento: 30min) <2.5 (peso: 1000 g/2,5 cm, de mantenimiento: 30min)	mm	ASTM D3654
Resistencia al desprendimiento 180°	>1	N / cm	ASTM D903


INSTRUCCIONES DE USO

Colocación

- Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de la institución.
- Limpie la herida y el área de aplicación.
- Remueva el producto de su empaque.
- Remueva el liner para exponer la superficie adhesiva.
- Centre el dispositivo sobre el sitio de colocación y/o fíjelo al catéter.
- Aplique presión moderada al dispositivo, para una mejor adherencia.
- Remueva el marco de aplicación, aplicando una presión suave a los bordes del dispositivo.
- Para los dispositivos que poseen un label, registrar la información y colocarla en o cerca del dispositivo.

Remoción

- Para remover, tome un borde del dispositivo y suavemente retírelo en la dirección del crecimiento del bello.
- Para remover el dispositivo cuando está sujetando catéteres u otros dispositivos, tome un borde y retire el apósito suavemente con un ángulo de 180°.
- Se debe tener precaución de no descolocar el catéter u otro dispositivo.
- Proporcione soporte a la piel o al catéter mientras retira el dispositivo.

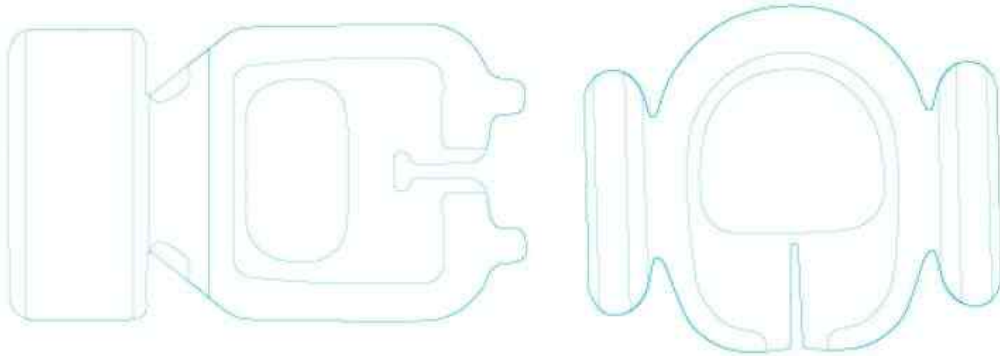

DESECHO

Desee el producto siguiendo los protocolos y/o regulaciones locales.

