

DESCRIPCIÓN

Vaporizador para el limpiador de adhesivos médicos sin irritaciones ESENTA™ (50 ml)

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Hexamethyldisiloxane
Octamethyldisiloxane

**FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO**

Convatec Limited – Reino Unido

Sitio de manufactura: HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido

Sitio de manufactura: WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulverice alrededor del borde del adhesivo y espere unos segundos.
2. Despegue suavemente el adhesivo de la piel con más vaporizador para facilitar la extracción, si es necesario.

USOS

Eliminación de adhesivos, apósitos y materiales de la piel.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

- Se seca en unos segundos.
- El vaporizador puede aplicarse en cualquier ángulo.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente

PRECAUCIONES

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.

ADVERTENCIAS

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MUY INFLAMABLE

VIDA ÚTIL	ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
4 años	Producto no estéril	INVIMA 2021DM-0024336 VIGENCIA: 1 de octubre de 2031	<ul style="list-style-type: none"> • No perforar ni quemar, incluso después de su uso. • Proteger de la luz solar. • No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
423289	Esenta Sting Free Adhesive Remover Spray 50ml	1 spray