



FICHA TÉCNICA: VENDA NEUROMUSCULAR CINTA DE KINESIOLOGÍA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 15 03 2022

PRESENTACIONES COMERCIALES

MARCA

FABRICANTE

REGISTRO SANITARIO

VIGENCIA REGISTRO SANITARIO

CLASIFICACIÓN RIESGO

Bolsa x 1 unidad, caja plegadiza x 1 unidad

Medical Supplies Corp. S.A.S

Anji Speng Industrial co., ltd con domicilio en china

INVIMA 2021DM - 0023352

22/03/2032

I

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO

COLOR

OLOR

COMPOSICIÓN

tejido de algodón recubierto con adhesivo médico hipoalergénico.

Azul, piel, rosado, negro, rojo y verde

Inoloro

algodón recubierto con adhesivo médico

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Pega indirectamente sobre la superficie de si mismo y no a la piel del paciente para ejercer una determinada presión, con el propósito de efecto terapéutico auxiliar.

CONSIDERACIONES

La venda neuromuscular es el elemento de uso a corto plazo.

USO PREVISTO

Proteja el movimiento de las articulaciones, músculos, fascia y alivie el dolor durante el ejercicio; reducir el impacto de la articulación y el tendón muscular, promover la circulación sanguínea, aliviar la tensión muscular; ayudar a corregir deformidades, contractura del tendón, lesión aguda o crónica del tendón, terapia de recuperación muscular

CONTRAINDICACIONES

No colocar sobre herida abiertas.

COLOCACIÓN

Zona de la piel sin vello, no usar después del ejercicio por el sudor.

Limpiar y secar la superficie de la piel.

No aplicar ningún tipo de cremas, lociones o aceites.

Tomar la medida exacta para corta la venda antes de colocarla.

EMPAQUE PRIMARIO

Bolsa x una unidad y caja x una unidad

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco.

DISPOSICIÓN FINAL

De acuerdo con las regulaciones locales para desechos ordinarios..

ELABORADO POR

DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA

REVISADO POR

CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA

APROBADO POR

JULIANA ARANGO PONCE