


**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

<b>Código</b>	<b>ODS-F14</b>
<b>Versión</b>	<b>D</b>
<b>Fecha</b>	<b>27-may-19</b>

<b>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:</b>	VENDA GEL ELÁSTICA						<b>VERSIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>VERSIÓN DE MOLDES</b>
<b>REFERENCIA INTERNA:</b>	KMV004 / KMV005 / KMV006 / AM-KMV004 / AM-KMV005 / AM-KMV006						A	A
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Venda elástica cubierta en gel polímero que sirve como coadyuvante en las etapas finales de restauración de la piel en casos de cirugía y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo.							
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	* Humecta la piel y evita resequedad. * Venda elástica que se adapta de una manera práctica a la zona a tratar.							
<b>USOS:</b>	Colocar la venda por el lado del gel polímero directamente sobre la superficie afectada. Envolver completamente utilizando toda la venda.							
<b>CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:</b>	GELKAM no es estéril por lo tanto NO se debe aplicar sobre heridas que aún estén abiertas. En caso de producirse irritación, suspenda su uso y consulte al especialista. Manténgase siempre fuera del alcance de los niños.							
<b>INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:</b>	Limpiar la venda con un paño húmedo. No usar detergente. No usar lavadora.							
<b>INSTRUCCIONES DE USO:</b>	1. Limpie cuidadosamente la piel que se va a cubrir con la venda. 2. Desenrolle la venda y empiece a cubrir la zona a tratar, teniendo en cuenta que la superficie en gel va directamente en contacto con la piel. 3. Utilizar la venda por un período máximo de ocho horas (8) continuas, no adicionar cremas y otros productos que afecten las propiedades originales.							
<b>COMPOSICIÓN</b>	GEL POLIMERO 98 %						OTROS 2 %	
<b>INSUMOS</b>	Venda Elástica			Plástico			Etiqueta	
	B.H.T			Bolsa			Inserto	
	Aceite mineral			Código de Barras				
	Kraton			Código Picking				
<b>COLOR / ES</b>	BEIGE							
<b>PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Presentación individual rollo 2" Presentación individual rollo 4" Presentación individual rollo 8"							
<b>TABLA DE MEDIDAS</b>	<b>TALLA</b>	<b>Contorno Superior</b>	<b>Contorno Inferior</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>	<b>Radio</b>	<b>Otras</b>
	KMV004	N.A	N.A	5 cm (2")	150 cm	N.A	N.A	N.A
	KMV005	N.A	N.A	10 cm (4")	150 cm	N.A	N.A	N.A
	KMV006	N.A	N.A	20 cm (8")	150 cm	N.A	N.A	N.A
<b>EMPAQUE:</b>	<b>Material</b>		<b>Tamaño</b>		<b>Peso</b>	<b>Calibre</b>	<b>Información que brinda</b>	
	BOLSA	KMV004 KMV005	26 cm x 20 cm		11,6 gr	N.A	N.A	
		KMV006	20 cm x 39 cm		25 gr	N.A		
		ETIQUETA ADHESIVA		13 CM X 15.5 CM		4.4 gr.		
	STICKER PICKING		5 cm ancho x 2.5cm alto		0,2gr	N.A	Referencia, Lote.	
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS		10 cm ancho x 3.5 cm alto		1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.	
	INSERTO		7 cm ancho x 9 cm alto		1,5 gr	N.A	Modo de empleo, Cuidados y recomendaciones y precaución.	
<b>No. REGISTRO SANITARIO:</b>	INVIMA 2017DM-0001327-R1			<b>OBSERVACIONES:</b>		N.A		
<b>FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:</b>	20/5/2021							