

**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

<b>Código</b>	<b>ODS-F14</b>
<b>Versión</b>	<b>D</b>
<b>Fecha</b>	<b>27-may-19</b>

<b>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:</b>	GEL ABDOMINAL		<b>VERSIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>VERSIÓN DE MOLDES</b>				
<b>REFERENCIA INTERNA:</b>	430001NL		A	A				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Lámina de gel polímero utilizada en post operatorio de zona abdominal. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en potsoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas.							
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Láminas de gel que contienen aceite mineral 100% grado médico. Dimensiones: 14 cm largo por 4 cm de ancho. Cada lámina tiene 2 mm de espesor con malla de soporte. Su tamaño facilita el uso e igualmente pueden ser recortadas a la medida necesaria. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, Cada lámina de gel es reutilizable. Tamaño ajustable.							
<b>USOS:</b>	Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.							
<b>CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:</b>	En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituyen el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
<b>INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:</b>	Lavar diariamente las láminas con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar la lámina dentro del empaque original con su respectivo acetato para garantizar la vida útil del producto. Conservar en un lugar fresco.							
<b>INSTRUCCIONES DE USO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpia la piel antes de usar el producto.</li> <li>• Corta la lámina a la medida de ser necesario.</li> <li>• Retira el acetato.</li> <li>• Ubica la lámina sobre la zona a tratar con la malla hacia afuera.</li> <li>• Sujeta la lámina con cinta adhesiva especial para piel.</li> <li>• Usa la lámina por 6 a 12 horas al día para que la cicatriz quede más plana, ligera y suave.</li> <li>• Repite a diario estos pasos para obtener mejores resultados.</li> </ul>							
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
<b>INSUMOS</b>	Caja	Sticker para picking						
	Malla	Sticker para Código de barras						
	Acetato							
	Fécula de maíz							
<b>COLOR / ES</b>	BLANCO							
<b>PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO</b>	4 unidades cada una con malla							
<b>TABLA DE MEDIDAS</b>	<b>TALLA</b>	<b>Contorno Superior</b>	<b>Contorno Inferior</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>	<b>Radio</b>	<b>Otras</b>
	UNIVERSAL	N.A	N.A	14cm	4cm	2mm	N.A	TOLERANCIA DE (+/-) 1 MM
<b>EMPAQUE:</b>	<b>Material</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Peso</b>	<b>Calibre</b>	<b>Información que brinda</b>			
	CAJA	Medidas: 11cm ancho, 15cm alto, fuelle 1cm		18	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.			
	STICKER PICKING	3cm ancho x 3cm alto	1,2gr	N.A	Referencia, Lote.			
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS	3cm ancho x 3cm alto	1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.			
<b>No. REGISTRO SANITARIO:</b>	INVIMA 2021DM-0024510		<b>OBSERVACIONES:</b>		N.A			
<b>FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:</b>	21/9/2021							