

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	GEL ABDOMINAL		VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES				
REFERENCIA INTERNA:	430003NL		A	A				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Lámina de gel polímero utilizada en post operatorio de zona abdominal. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en potsoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas.							
CARACTERÍSTICAS:	Lámina de gel que contiene aceite mineral 100% grado médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel. Cada lámina de gel es reutilizable. Su tamaño facilita el uso e igualmente pueden ser recortadas a la medida necesaria. Dimensiones: 47cm largo por 8.5 cm de ancho. 2 mm de espesor con malla de soporte.							
USOS:	Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:	En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituye el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar diariamente la lámina con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar la lámina dentro del empaque original con su respectivo acetato para garantizar la vida útil del producto, Conservar en un lugar fresco.							
INSTRUCCIONES DE USO:	<ul style="list-style-type: none"> · Limpia la piel antes de usar el producto. · Retira el acetato. · Corta la lámina a la medida o forma necesaria. · Ubica la lámina sobre la zona a tratar con la malla hacia afuera. · Sujeta la lámina con cinta adhesiva especial para piel. · Usa la lámina por 6 a 12 horas al día para que la cicatriz quede más plana, ligera y suave. · Repite a diario estos pasos para obtener mejores resultados. 							
COMPOSICIÓN	Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
INSUMOS	Caja	Sticker para picking						
	Malla	Sticker para Código de barras						
	Acetato							
	Fécula de maíz							
COLOR / ES	BLANCO							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	1 unidad con malla							
TABLA DE MEDIDAS	TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
	Universal	N.A	N.A	47cm	9	2mm	N.A	TOLERANCIA DE (+/-) 1 MM
EMPAQUE:	Material	Tamaño	Peso	Calibre	Información que brinda			
	CAJA	Medidas: 11cm ancho, 15cm alto, fuelle 1cm		18	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.			
	STICKER PICKING	3cm ancho x 3cm alto	1,2gr	N.A	Referencia, Lote.			
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS	3cm ancho x 3cm alto	1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.			
No. REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2021DM-0024510		OBSERVACIONES:		N.A			
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	15/6/2022							