

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	GEL MAMAS		VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES				
REFERENCIA INTERNA:	433242NL		A	A				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Lámina de gel polímero utilizada en postoperatorio de mamas. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios por aumento o reducción de mamas.							
CARACTERÍSTICAS:	Lámina de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico. Dimensiones: 11 cm x 24.5 cm, 2mm de espesor. Su forma de ancla permite adaptarse al contorno de la mama. Viene con malla de soporte. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, gel reutilizable. Tamaño ajustable.							
USOS:	Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios por aumento o reducción de mamas. Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:	En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituye el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar diariamente las láminas con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar la lámina dentro del empaque original con su respectivo acetato para garantizarla vida útil del producto Conservar en un lugar fresco							
INSTRUCCIONES DE USO:	<ul style="list-style-type: none"> · Limpia la piel antes de usar el producto. · Retira el acetato. · Ubica la lámina sobre la zona a tratar con la malla hacia afuera. · Sujeta la lámina con cinta adhesiva especial para piel. · Usa la lámina por 6 a 12 horas al día para que la cicatriz quede más plana, ligera y suave. · Repite a diario estos pasos para obtener mejores resultados. 							
COMPOSICIÓN	Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
INSUMOS	Caja	Sticker para picking						
	Malla	Sticker para Código de barras						
	Acetato							
	Fécula de maíz							
COLOR / ES	TRANSPARENTE							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	Presentación X 2 unidades							
TABLA DE MEDIDAS	TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	ALTO	ANCHO	RADIO	ESPESOR	Otras
	433242NL	N.A	N.A	11 cm	24.5cm	N.A	2mm	N.A
EMPAQUE:	Material	Tamaño	Peso	Calibre	Información que brinda			
	CAJA	22 x 13,5 cm		18	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.			
	STICKER PICKING	3 cm x 2.8 cm	1,2gr	N.A	Referencia, Lote.			
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS	3 cm x 2.8 cm	1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.			
No. REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2021DM-0024510		OBSERVACIONES:			N.A		
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	21/9/2021							

