

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	LÁMINA EN GEL CON MALLA	VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES					
REFERENCIA INTERNA:	409012NL	A	A					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Lámina de gel polímero con malla. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices.							
CARACTERÍSTICAS:	Lámina de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico, con malla. Dimensiones: 20 cm x 10 cm, 3 mm de espesor. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, lámina reutilizable. Tamaño ajustable. Uso diurno / nocturno.							
USOS:	Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:	En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituye el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar diariamente la lámina con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar la lámina dentro del empaque original con su respectivo acetato para garantizar la vida útil del producto. Conservar en un lugar fresco.							
INSTRUCCIONES DE USO:	<ul style="list-style-type: none"> · Limpia la piel antes de usar el producto. · Corta la lámina a la medida o forma necesaria. · Retira el acetato. · Ubica la lámina sobre la zona a tratar con la malla hacia afuera. · Sujeta la lámina con cinta adhesiva especial para piel. · Usa la lámina por 6 a 12 horas al día para que la cicatriz quede más plana, ligera y suave. · Repite a diario estos pasos para obtener mejores resultados. 							
COMPOSICIÓN	Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
INSUMOS	Malla	Fécula de maíz						
	Sticker para Código de barras	Sticker para picking						
	Acetato							
	Caja							
COLOR / ES	TRANSPARENTE							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	Presentación individual medida 10cm x 20cm x 3mm							
TABLA DE MEDIDAS	TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Espesor	Otras
	UNIVERSAL	N.A	N.A	N.A	10 cm	20 cm	3 mm	N.A
EMPAQUE:	Material	Tamaño	Peso	Calibre	Información que brinda			
	CAJA	22 x 13,5 cm		18	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.			
	STICKER PICKING	3 cm x 2.8 cm	1,2gr	N.A	Referencia, Lote.			
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS	3 cm x 2.8 cm	1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.			
No. REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2021DM-0024510			OBSERVACIONES:		N.A		
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	21/9/2021							