



**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

<b>Código</b>	ODS-F14
<b>Versión</b>	D
<b>Fecha</b>	27-may-19

<b>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:</b>	GEL PERIAREOLAR						<b>VERSIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>VERSIÓN DE MOLDES</b>
<b>REFERENCIA INTERNA:</b>	430002NL						A	A
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios de mamas.						 	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Lámina de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico. Dimensiones: 8 cm x 8 cm, 2mm de espesor. Su forma circular pre-cortada permite adaptarse al contorno del pezón. Viene con malla de soporte. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, gel reutilizable.							
<b>USOS:</b>	Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios de mamas. Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad.							
<b>CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:</b>	En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituye el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
<b>INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:</b>	Lavar diariamente la lámina con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar la lámina dentro del empaque original con su respectivo acetato para garantizarla vida útil del producto. Conservar en un lugar fresco.							
<b>INSTRUCCIONES DE USO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpia la piel antes de usar el producto.</li> <li>Retira el acetato.</li> <li>Ubica la lámina sobre la zona a tratar con la malla hacia afuera.</li> <li>Sujeta la lámina con cinta adhesiva especial para piel.</li> <li>Usa la lámina por 6 a 12 horas al día para que la cicatriz quede más plana, ligera y suave.</li> <li>Repite a diario estos pasos para obtener mejores resultados.</li> </ul>							
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
<b>INSUMOS</b>	Malla	Fécula de maíz						
	Acetato	Sticker para picking						
	Elastico	Sticker para Código de barras						
	Caja							
<b>COLOR / ES</b>	TRANSPAENTE							
<b>PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Presentación X 2 unidades talla Universal							
<b>TABLA DE MEDIDAS</b>	<b>TALLA</b>	<b>Contorno Superior</b>	<b>Contorno Inferior</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Diametro</b>	<b>Radio</b>	<b>Otras</b>
	UNIVERSAL	N.A	N.A	N.A	N.A	8 cm	3.5 cm	N.A
<b>EMPAQUE:</b>	<b>Material</b>	<b>Tamaño</b>		<b>Peso</b>	<b>Calibre</b>	<b>Información que brinda</b>		
	CAJA	9x9cm			18	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.		
	STICKER PICKING	3 cm x 2.8 cm		1,2gr	N.A	Referencia, Lote.		
	STICKER CÓDIGO DE BARRAS	3 cm x 2.8 cm		1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.		
<b>No. REGISTRO SANITARIO:</b>	INVIMA 2021DM-0024510			<b>OBSERVACIONES:</b>		N.A		
<b>FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:</b>	21/9/2021							