

# Pharmafix®



Nombre genérico:  
Cinta Poliéster Stress

Nombre comercial:  
Cinta Pharmafix

## Características

- Cinta médica adhesiva de tela de poliéster no tejida entrelazada
- Recubierto en un lado con adhesivo acrílico hipoalergénico
- Altamente confortable y estático a lo largo; flexible (stress) hacia lo ancho
- Fuerte adhesión inicial que aumenta con el tiempo
- Área adhesiva recubierta en papel siliconado en zig zag para fácil aplicación
- Tubo central en plástico que permite conservar su forma hasta el final

## Uso e indicación

- Sujeción de vendajes de gran superficie o gasas postquirúrgicas
- Ideal para piel sensible
- Como apósito general en cualquier parte del cuerpo
- Fijación de catéteres y tubos de drenaje
- Permite recubrir articulaciones sin restringir el movimiento

## Advertencia

- No usar si conoce alergias a sus componentes.
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud
- Después de la fecha de vencimiento pierde su efecto adhesivo

Fabricado por: Pharmaplast Ciudad: Amria • Alejandría • Egipto

Importado por: Ortotex S.A.S Ciudad: Medellín • Antioquía • Colombia

Invima: 202ODM-0021453 Vence: 19/03/2030

# FICHA TÉCNICA

Referencia	Dimensión Total		Dimensión Total		Presentación	
	cms	mts	Pulgadas	Yardas	Rollos/ Caja	Caja/ Cajas
	Ancho	Long	Ancho	Long		
Fix5010	5,00	x 10,00	2"	x 10,94	1	72
Fix1010	10,00	x 10,00	4"	x 10,94	1	36
Fix 1510	15,00	x 10,00	6"	x 10,94	1	36

## Instrucciones de Uso

Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas y sobre la piel limpia y seca

## Pasos para aplicarlo




Separe las aletas demarcadas en zig zag



Separe un ala en su totalidad



Posicione en el área a tratar

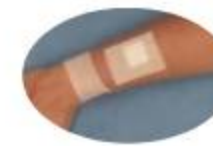

Procesa a desprender el ala que aún conserva, luego presiones con suavidad los bordes de la cinta para obtener la fijación a la piel

Pharmafix una fijación segura de apósitos primarios

## Datos técnicos:

- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Riesgo: (I)
- Vida útil: Cinco (5) años
- Bodegaje: Temp:  $\leq 40^{\circ}\text{C}$  / Humedad:  $\leq 75^{\circ}\text{F}$   
(Espacio limpio y alejado de calor y humedad excesiva)
- Producto No estéril.  
Para esterilizar utilice método con óxido de etileno (ETO) o radiación

