

CÓDIGO: FTP-ID-001  
VERSIÓN: 1  
FECHA DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



## FICHA TÉCNICA

### NOMBRE DEL PRODUCTO

WESCOCIDE GL  
Desinfectante líquido para instrumental médico  
quirúrgico

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto líquido desinfectante que permite eliminar un amplio espectro de microorganismos del instrumental médico quirúrgico. Su actividad se mantiene por espacio de 14 días

REGISTRO Y VIGENCIA  
Colombia: 2007DM-0000873

ASPECTO  
Líquido amarillo traslucido

COMPOSICIÓN  
Glutaraldehído.....2%

MECANISMO DE ACCION  
La actividad biocida del glutaraldehído resulta de la alquilación de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo y amino presentes en los microorganismos, que altera el ARN, el ADN y la síntesis de proteínas.

### ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> ( ATCC 6538)	10 minutos	99.999%
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 16404)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		

VIDA UTIL  
2 años

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Amplia acción microbicida
- Duración estimada en 14 días después de activado.
- Indicado para uso en instrumental médico u odontológico y endoscopios flexibles.

RECOMENDACIONES DE USO  
Desinfección de Instrumental quirúrgico

### MODO DE USO

1. Active agregando todo el contenido de la solución activadora al producto.
2. Vierta el producto en una cubeta plástica con tapa.
3. Sumerja el instrumental, previamente lavado y completamente seco, en el desinfectante por espacio de 20 minutos.
4. Retire el instrumental de la cubeta y enjuague con suficiente agua estéril.
5. Seque completamente el instrumental.
6. Descarte el producto luego de 14 días de uso

### RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto
- No mezclar con otros productos químicos
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS)

### PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos  
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste consultar al médico.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

- Contacto con la piel  
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.

- Ingestión  
No inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula no se debe continuar usando el producto.

- Inhalación  
Si presenta síntomas al exponerse al producto trasládese al aire fresco. Si los síntomas persisten consulte un especialista.

PRESENTACIONES  
Envase rígido (3.785 Litros)

PARTIDA ARANCELARIA  
38.08.94.19.00

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia

